



TOUT LE MONDE REMARQUERA,  
MAIS PERSONNE NE SAURA.



[juvederm.ca](http://juvederm.ca)

Allergan Inc., créatrice de BOTOX Cosmétique<sup>MD</sup>



RETROUVEZ CE QUE LE TEMPS  
VOUS A VOLÉ

Le soleil, les changements hormonaux et l'âge sont des facteurs qui modifient l'apparence de votre peau. Avec le temps, votre peau perd de son acide hyaluronique et de son collagène, ce qui fait diminuer son volume et son élasticité et cause les rides et les sillons faciaux.

RAFRAÎCHISSEZ CE QUE LA NATURE  
VOUS A DONNÉ

Juvéderm<sup>MC</sup> est un gel injectable homogène utilisé par votre médecin pour restaurer et rafraîchir votre apparence. Ce gel contient de l'acide hyaluronique (un sucre produit naturellement par l'organisme) qui se combine à l'eau que contient votre peau et restaure instantanément le volume dermique en minimisant la profondeur des rides et des sillons. Il rehausse et souligne l'apparence des lèvres, des pommettes et du contour de la mâchoire. Les injections d'acide hyaluronique sont reconnues pour stimuler la production de collagène. Et surtout, Juvéderm<sup>MC</sup> donne des résultats instantanés et incroyablement naturels qui durent jusqu'à un an\*. De plus, son innocuité a été démontrée pour tous les teints.

JUVÉDERM<sup>MC</sup> – POUR UN PLUS  
GRAND CONFORT

Le nouveau Juvéderm<sup>MC</sup> avec lidocaïne est une formule unique conçue pour vous faire sentir bien avant, pendant et après votre traitement Juvéderm<sup>MC</sup>. L'ajout de lidocaïne, un anesthésique local efficace, à Juvéderm<sup>MC</sup> assure une injection en douceur et confortable.

*« Je laisse les gens  
penser que je reviens  
d'un long congé. »*

## DES RÉSULTATS D'APPARENCE NATURELLE

### REGONFLE LES LÈVRES




AVANT



APRÈS

### ADOUCIT LES RIDES D'EXPRESSION

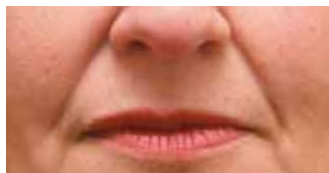

AVANT



APRÈS

### ADOUCIT LES RIDES AUTOUR DE LA BOUCHE ET LA MÂCHOIRE



AVANT



APRÈS\*

### AUGMENTE LE VOLUME DERMIQUE



AVANT



APRÈS\*

En plus de Juvéderm<sup>MC</sup>, la personne sur la photo a reçu une injection de BOTOX Cosmétique<sup>MD</sup> pour traiter la région des yeux et du front. \*Le traitement a été administré par le Dr Vince Bertucci.

## OÙ PEUT-ON UTILISER JUVÉDERM<sup>MC</sup>?



## EN QUOI EST-IL DIFFÉRENT?

Juvéderm<sup>MC</sup> utilise une technologie brevetée appelée HYLACROSS qui produit un gel lisse, consistant et dont les effets peuvent durer jusqu'à un an\*. C'est grâce à cette technologie avancée que les résultats paraissent aussi naturels. De plus, Juvéderm<sup>MC</sup> est le premier gel à base d'acide hyaluronique dont l'innocuité et l'efficacité ont été démontrées pour tous les teints.

## QUE PEUT-ON ATTENDRE D'UN TRAITEMENT JUVÉDERM<sup>MC</sup>?

Pendant l'intervention, votre professionnel de la santé introduira délicatement le gel injectable Juvéderm<sup>MC</sup> sous votre peau pour augmenter le volume de la zone à traiter ou pour combler les rides et les sillons faciaux.

Au cours des 24 premières heures suivant le traitement, vous devez éviter :

- les efforts intenses;
- la consommation de boissons alcoolisées;
- l'exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou à un froid intense.

Pour visualiser ce que Juvéderm<sup>MC</sup> peut faire pour vous, créez vos propres photos avant-après avec notre nouvel outil révolutionnaire Revitaliseur Juvéderm<sup>MC</sup>, ou trouvez les coordonnées d'un médecin qualifié sur [juvederm.ca](http://juvederm.ca)

## QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

### COMBIEN DE TEMPS DURENT LES EFFETS DE JUVÉDERM<sup>MC</sup>?

La formule unique de Juvéderm<sup>MC</sup> procure des résultats pouvant durer jusqu'à un an\*.

### COMBIEN DE TEMPS DURE HABITUELLEMENT LE TRAITEMENT?

Le processus d'injection, simple et rapide, ne prend que 15 à 60 minutes, selon la région traitée. Vous devez également consacrer un peu de temps à la consultation de votre médecin avant l'intervention.

### DANS COMBIEN DE TEMPS LES RÉSULTATS SERONT-ILS VISIBLES?

Les résultats sont instantanés. Vous verrez une amélioration immédiate dans la zone de traitement.

### LE TRAITEMENT JUVÉDERM<sup>MC</sup> EST-IL DOULOUREUX?

Votre professionnel de la santé injecte Juvéderm<sup>MC</sup> directement dans la peau à l'aide d'une aiguille fine afin de diminuer l'inconfort de l'injection. Le fait que Juvéderm<sup>MC</sup> soit aussi offert en version avec lidocaïne antidouleur rend l'injection plus aisée.

### QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES?

Juvéderm<sup>MC</sup> est généralement bien toléré. Les effets secondaires possibles sont légers ou modérés et ne durent généralement pas plus de sept jours. Il peut s'agir de réactions cutanées temporaires – comme les rougeurs, la peau sensible et les bleus – qui se camouflent à l'aide de fond de teint léger.

### COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR SE REMETTRE DU TRAITEMENT?

Le temps de récupération est minime, et la plupart des personnes traitées retournent à leurs activités quotidiennes immédiatement.

\* Tel que démontré lors d'études cliniques réalisées avec Juvéderm<sup>MD</sup> Ultra et Juvéderm<sup>MD</sup> Ultra Plus sur des sillons naso-géniens (rides du sourire).

## SOFT LIFT<sup>MC</sup>... RAJEUNISSEMENT FACIAL COMPLET

Avec l'âge, la peau du visage passe par les trois phases « D » du vieillissement : la détérioration (la peau change de texture et des rides apparaissent), la descente (la peau pend) et la diminution de l'épaisseur de la peau. Soft Lift<sup>MC</sup> utilise conjointement l'agent de restauration du volume dermique Juvéderm<sup>MC</sup> et le BOTOX Cosmétique<sup>MD</sup>. Le résultat d'ensemble est un visage d'apparence équilibrée et un effet subtil tout à fait naturel.

À l'aide du traitement Soft Lift<sup>MC</sup>, les professionnels des interventions esthétiques peuvent utiliser le BOTOX Cosmétique<sup>MD</sup> pour traiter les rides du haut du visage, comme les pattes-d'oie et les rides de froncement des sourcils et du front, en combinaison avec Juvéderm<sup>MC</sup> pour restaurer le volume dermique et traiter les plis du milieu et du bas du visage. Choisissez Soft Lift<sup>MC</sup> pour bien paraître à tout âge.

Voici les bienfaits visibles du traitement Soft Lift<sup>MC</sup> :



AVANT



APRÈS\*



AVANT



APRÈS\*

\*Les traitements ont été administrés par le Dr Vince Bertucci.

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

---

Nom de votre professionnel de la santé

---

Numéro de téléphone

---

Date et heure du rendez-vous



[juvederm.ca](http://juvederm.ca)



Cette brochure est fournie aux médecins pour l'éducation de leurs patients.  
<sup>MD</sup> Marque déposée d'Allergan Inc. <sup>MC</sup> Marque de commerce d'Allergan Inc.